

Starazolin HydroForte acu pilieni

Lietošanas instrukcija – lūdzam to rūpīgi izlasīt

Intensīvi mitrinoši acu pilieni, kas izstrādāti lietošanai smaga sausās acs sindroma gadījumā.

SASTĀVS

Nātrijs hlorīds, nātrijs dihidrogēnfosfāta dihidrāts, bezūdens dinātrijs fosfāts, 0,4 % nātrijs hialuronāts, attīrīts ūdens

BEZ KONSERVANTIEM

TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS

Starazolin HydroForte paredzēts **smagas** sauso acu sindroma **formas** atvieglošanai.

Starazolin HydroForte mitrina, aizsargā un mazina graušanas sajūtu. Pilienu lietošana ātri atvieglo sausās acs sindroma radīto diskomfortu, piemēram, sausuma sajūtu, smilšu graudiņu klātbūtnes sajūtu zem plakstiņiem un kairinājumu.

Sausās acs sindroma simptomu atvieglošana var mazināt komplikāciju risku.

Starazolin HydroForte efektīvi novērš simptomus, ko izraisa

- asaru deficīta vai pārmērīgas asaru iztvaikošanas izraisīta asaru plēvītes anomālija, kuras dēļ iespējami acs virsmas bojājumi un ar tiem saistītais diskomforts;
- nevēlami vides apstākļi (centrālapkure, gaisa kondicionēšana, fluorescences spuldžu izmantošana, smēķēšana un vējš);
- ilgs darbs pie datora;
- acu pilienu ar asinsvadus sašaurinošu darbību lietošana;
- novecošana (sausas acs sindroms ir 75 % cilvēku pēc 65 gadu vecuma);
- kontaktlēcu valkāšana;
- ķirurģiska ārstēšana vai acu traumas;
- dzimums (hormonālās pārmaiņas sievietes grūtniecības laikā, barošana ar krūti, mēnešreizes vai menopauze);
- zāļu (antidepressantu, prethipertensijas līdzekļu vai kontracepcijas līdzekļu) lietošana;
- slimības (reimatoīdais artrīts, diabēts, astma, vairogdziedzera slimības, glaukoma).

Starazolin HydroForte ir acu pilieni ar palielinātu viskozitāti, tādēļ nātrijs hialuronāts ilgāk paliek uz acs virsmas. Tas acīm nodrošina ilgāku mitrināšanu un labāku aizsardzību.

Nātrijs hialuronāts dabiski rodas acs ābola kameru šķidrumā un stiklveida ķermenī.

0,4 % nātrija hialuronāta, ko satur Starazolin HydroForte, uz acs ābola izveido aizsargplēvīti, un tā novērš sausās acs sindroma simptomus, piemēram, sausuma sajūtu, smilšu graudiņu klātbūtnes sajūtu zem plakstiņiem un kairinājumu.

Starazolin HydroForte acu pilienu lietošana ir ieteicama arī pēc ķirurģiskas ārstēšanas un pret acu sausumu, ko izraisījusi pretiekaisuma zāļu lietošana acīs (pēc konsultēšanās ar ārstu).

Pirms Starazolin HydroForte acu pilienu lietošanas jāizņem kontaktlēcas, un pirms to ielikšanas atpakaļ acīs jāpaiet 15 minūtēm.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

Nelietot Starazolin HydroForte, ja

- ir paaugstināta jutība (alerģija) pret nātrija hialuronātu vai kādu citu šo pilienu sastāvdaļu. Ja ir radusies alerģiska reakcija, nekavējoties jāpārtrauc pilienu lietošana un jākonsultējas ar ārstu.

Citas piebildes

- Nelietojiet pilienus, ja pamanāt, ka ir bojāta pudelīte vai aplikators.
- Lietošanas drošuma un higiēnas apsvērumu dēļ katru pudelīti ir atļauts lietot tikai vienai personai.
- Par Starazolin HydroForte acu pilienu mijiedarbību ar kontaktlēcu uzglabāšanas šķīdumiem, citiem acu pilieniem vai lokāli lietojamām acu zālēm nav zināms. Ja lietojat arī citas acu zāles, pirms dažādu līdzekļu lietošanas jānogaida vismaz 15 minūtes.

Piezīme

Starazolin HydroForte uz mirkli var izraisīt redzes miglošanos, tādēļ šai laikā ir ieteicams atturēties no transportlīdzekļa vadīšanas vai darba ar iekārtām un nogaidīt, līdz ir atjaunojusies asa redze.

ZĀĻU DROŠUMS

Pilinātājā ir īpašas konstrukcijas filtrs, kas ļauj **droši lietot** pilienus, jo nepieļauj to piesārņošanu pat pēc iepakojuma atvēršanas.

Šie pilieni nesatur konservantus, tādēļ vēl vairāk samazinās acu kairinājuma un to virsmas bojājumu iespējamība.

Kopumā pilieni ir labi panesami, tomēr tad, ja novērojat jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Pilienus pēc nepieciešamības var lietot vairākas reizes dienā. Ja pilieni tiek lietoti pareizi, ar vienas pudelītes saturu pietiek 30 dienām. Par ilgstošu lietošanu jākonsultējas ar ārstu.

Acī iepilināt 1–2 pilienus un vairākas reizes samirkšķināt aci, lai šķīdums vienmērīgi izkliedētos pa acs virsmu. Pilieni nesatur konservantus, tādēļ to lietošana acīs ir droša.

ŠIE PILIENI IR LIETOJAMI DIVOS VEIDOS

VAI	[attēls] 1	[attēls] 2	[attēls] 3	[attēls] 4
	[attēls] 1	[attēls] 2	[attēls] 3	[attēls] 4

1. Izņemiet no sūkņa aizbāzni.
2. Satveriet sūkni rokās, ka parādīts 2. attēlā.
3. Apgrieziet pudelīti otrādi un spiediet sūkni, līdz parādās pirmais piliens.
4. Turot pudelīti ar augšdaļu uz leju un spiežot sūkni, iepilīniet acī parakstīto pilienu daudzumu.

RAŽOTĀJS

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Horvātija

IZPLATĪTĀJS

[LOGOTIPS]

Polpharma SA Pharmaceutical Works

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polija

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Uzdrukāts uz iepakojuma.

Pēc iepakojuma atvēršanas pilienu derīguma termiņš ir 180 dienas.

Nelietot pilienus, kad pagājis to derīguma termiņš.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt pilienus oriģinālajā iepakojumā līdz 30 °C temperatūrā.

Uzglabāt šos pilienus bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

IEPAKOJUMS

10 ml

[symbols:] CE₁₃₀₄

PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019. gada aprīlis

Uz iepakojuma izmantoto simbolu paskaidrojums