

Pirms šīs medicīniskas ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja simptomi saglabājas vai pastiprinās, sazinieties ar ārstu.

 Polfa Warszawa S.A.

Starazolin® Complete

acu pilieni ar 0,2% nātrija hialuronātu un 2% dekspantenolu

Natrii hyaluronas, dexpanthenolum

Nesatur konservantus

Intensīvi mitrinoši pilieni ar aizsargājošu un atjaunojošu iedarbību.

Satura rādītājs

- Kas ir medicīniska ierīce Starazolin Complete un kādam nolūkam to lieto
- Svarīga informācija pirms medicīniskas ierīces Starazolin Complete lietošanas
- Kā lietot medicīnisko ierīci Starazolin Complete
- Iespējamās blakusparādības
- Kā uzglabāt medicīnisko ierīci Starazolin Complete
- Cita informācija

1. Kas ir medicīniska ierīce Starazolin Complete un kādam nolūkam to lieto

Starazolin Complete ir sterili acu pilieni, kas satur nātrija hialuronātu un dekspantenolu, bez konservantiem.

- Nātrija hialuronāts ir cilvēka kerīmenī, piemēram, asaru plēvītes (asaru) sastāvā, esoša dabiska viela.
- Dekspantenols ir viela, kas ietilpst B vitamīnu grupā un papildina nātrija hialuronātu īpašības. Šīs vielas ātri, intensīvi un ilgstoši mitrina, veicina reģenerāciju, aizsargā, atsvaidzina un baro acs virsmu.

Starazolin Complete sniedz atvieglojumu šādos gadījumos:

- sausums;
- graūšanas, svešķermeņa sajūta acī;
- nogurums;
- dedzināšanas sajūta;
- nieze;
- asarošana;
- kairinājums;
- īslaicīga redzes miglošanās acu noguruma dēļ.

Pilieni atjauno acu hidratācijas dabisko līdzvaru, pasargā acis no atkārtotas izzūšanas un palīdz tās uzturēt labā stāvoklī.

Starazolin Complete satur nātrija hialuronātu – dabisku vielu, kas veido viendabīgu, izturīgu un ilgstoši kalpojošu aizsargslāni uz acs virsmas, pasargā no kairinājuma un atkārtotas izzūšanas. Šim slānim nav nevēlamas ietekmes uz redzi.

Starazolin Complete satur arī dekspantenolu (B provitamīnu), kas pastiprina nātrija hialuronātu mitrinošās īpašības, kā arī veicina reģenerāciju un aizsargā acs virsmu.

Starazolin Complete mitrina, aizsargā un veido aizsargslāni uz acs virsmas, novēršot nepārīkamas sajūtas, kas ir saistītas ar:

- acs mehānisku kairinājumu, piemēram, acs izmeklēšanas laikā, un kontaktlēcu vākšanu;
- kosmētikas līdzekļu lietošanu, vides faktoru ietekmi – gaisa kvalitāti, aukstu, karstu un sausu gaisu, vēju, piemēram, tabakas dūmu izraisītu gaisa piesārņojumu, smogu, kā arī uzturēšanos putekļainās telpās vai saulē;
- acu nogurumu, ko ir izraisījusi ilgstoša redzes koncentrēšana, piemēram, darbs pie datora, ilgstoša transportlīdzekļa vadīšana, lasīšana, televizora skatīšanās vai viedtāruņa lietošana;
- nepietiekamu asaru daudzumu vai to sastāvā pārmaiņām, arī cilvēkiem ar sausās acs sindromu un cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma.

Starazolin Complete var lietot cilvēki, kas izmanto jebkura veida kontaktlēcas.

2. Svarīga informācija pirms medicīniskas ierīces Starazolin Complete lietošanas

Nelietojiet medicīnisko ierīci Starazolin Complete šādos gadījumos:

- ja Jums ir alergīja (paaugstināta jutība) pret jebkuru medicīniskās ierīces sastāvdalīju;
- acs(-u) infekcijas gadījumā.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Mijiedarbība (savstarpejā ietekme) ar citiem acu pilieniem nav zināma. Ja nepieciešama vienlaicīga lietošana ar citiem acu pilieniem vai ziedēm, nākamie pilieni vai ziedē ir jālieto ne ātrāk kā pēc 15 minūtēm. Starazolin Complete ir jālieto pēdējais.

Pēc iepilināšanas ir iespējama īslaicīga redzes miglošanās. Šādā gadījumā nevadiet transportlīdzekļus un neapkalojiet mehānismus, kamēr traucējumi nav izzuduši. Iespējams arī īslaicīgs kairinājums/dedzināšanas sajūta/durstīšanas sajūta. Ja kāda no šīm izpausmēm saglabājas vai pastiprinās, nekavējoties informējiet ārstu.

Ne caurduriet pilināšanas sistēmu pirms lietošanas.

3. Kā lietot medicīnisko ierīci Starazolin Complete


Rīkojieties saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem, kas palīdzēs pareizi lietot medicīnisko ierīci Starazolin Complete.

Lietošanas veids

Higiēnisku apsvērumu dēļ vienu ierīces iepakojumu drīkst lietot tikai viens lietotājs.

- Pirms ierīces Starazolin Complete iepilināšanas, lūdzu, rūpīgi nomazgājiet rokas.
- Pirms lietot pirmo reizi, noņemiet vāciņu, pagrieziet pudelītes dozatoru uz leju, tad saudzīgi saspiediet pudelīti, līdz parādās pirms piliens.
- Pirms lietot lietošanas noņemiet vāciņu un iepiliniet pilienus acī(-īs).
- Parastā deva ir 1-2 pilieni 3 reizes dienā katras acs konjunktīvas maisā, vai arī saskaņā ar acu ārsta ieteikumiem.
- Lēni aizveriet acis, lai šķidrums varētu vienmērīgi nosegt visu acs(-u) virsmu.
- Aizveriet pudelīti.
- Nepieļaujiet, lai pilinātāja gals pieskartos acs virsmai.

Nokratiet atlikušo pilienu.

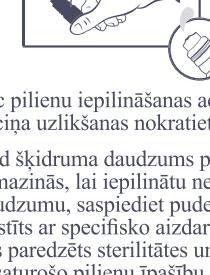

Pēc pilienu iepilināšanas acīs un pirms vāciņa uzlikšanas nokratiet atlikušo pilienu.

Kad šķidrums daudzums pudelītē samazinās, lai iepilinātu nepieciešamo daudzumu, saspiediet pudelīti spēcīgāk. Tas saistīts ar specifisko aizdares mehānismu, kas paredzēts sterilitātes un konservantu nesaturošo pilienu īpašību saglabāšanai.

Tā kā Starazolin Complete nesatur konservantu, tas parasti ir labi panesams un to var lietot ilgu laiku.

Ja, neraugoties uz pilienu lietošanu, sāpīgums turpinās un saglabājas ilgāku laiku, konsultējieties ar acu ārstu.

Ja lietota lielāka Starazolin Complete deva nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumi nav bijuši.

4. Iespējamās blakusparādības

Atsevišķos gadījumos ir iespējamas alergiskas reakcijas, piemēram, dedzināšanas sajūta un acu asarošana, kas izzūd, kad ierīces lietošana tiek pārrauktā. Uzreiz pēc iepilināšanas ir iespējama īslaicīgi aizmiglota redze.

Alergiskas reakcijas simptomu vai citu blakusparādību gadījumā, lūdzu, informējiet ražotāju.

5. Kā uzglabāt Starazolin Complete

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu ārējā kartona kastītē.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet medicīnisko ierīci Starazolin Complete pēc derīguma termiņa beigām (), kas norādīts uz pudelītes un kartona kastītē.

Ierīci var lietot 90 dienas pēc pirmās atvēršanas.

6. Cita informācija

Sastāvs

Starazolin Complete sastāvā ir 0,2% nātrija hialuronāta, 2% dekspantenola, nātrija citrāta dihidrāts, citronskābes monohidrāts, augsti attīrtīs ūdens.

Caurspīdīgi, dzidri acu pilieni.

Iepakojums: pudelīte, kas satur 5 ml vai 10 ml šķiduma, aprīkota ar vārstā slēgšanas sistēmu un filtru, kas aizsargā medicīnisko ierīci no piesārņošanas ar mikroorganismiem. Medicīniskā ierīce ir ievelota kartona kastītē.



Polfa Warszawa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa, Polija

tel. +48 22 691 39 00

www.polfawar.com.pl

Lietošanas instrukcijas sagatavošanas datums: 2018. gada marts

 0197 STERILE A

Izmantoto simbolu skaidrojums:

 Sterile



Izlasīt lietošanas instrukciju



Izlietot līdz: (derīguma termiņš)

Ražotājs

Sērijas numurs

Uzglabāt temperatūrā līdz

+25°C